

# Hurtigguide – Freedom BTE

## AV/PÅ

Hold knapp 3 inne i et par sekunder for å slå AV eller PÅ

I det du starter vises tre streker på displayet – de forteller hvilken side prosessoren tilhører

## Skifte program

Trykk en kort gang på knapp 3 for å skifte til et annet program.

Du kan ha inntil 4 programmer og nummeret på programmet vises på displayet.

## Mikrofonfølsomhet

Justeres ned eller opp ved korte trykk på 1 eller 2.

Det vises en S når denne justeres og intervallet er fra 1 til 20 for hvert program. Dersom du øker følsomheten plukker mikrofonen opp svakere lyder. Skal normalt stå på 12.

## Tastelås

Hold 3 og 1 inne samtidig i noen sekunder for å aktivere tastelås.

Gjenta for å deaktivere.

## Volumkontroll

Justeres ned eller opp ved å holde 1 eller 2 nede i to 2-3 sek. til det vises en V i displayet.

Intervall fra 1 til 9 dersom tilgjengelig i programmet

## Telespole


Ved å trykke på 1 og 2 samtidig i et par sekunder, veksler du mellom Telespole og Mikrofon

Avhengig av programmering har du MT eller T, og dette vises i displayet

## Eksternt Audioutstyr

Eksternt audioutstyr aktiveres ved å skru prosessoren PÅ med utstyret montert, eller trykke på 1 og 2 samtidig i et par sekunder.

Når eksternt Audioutstyr er aktivisert veksler man mellom M, T og EA ved å trykke på 1 og 2 samtidig i noen sekunder. Det vises EA noen sekunder i displayet når dette er aktivisert, og deretter viser displayet M igjen. (se figur til høyre)

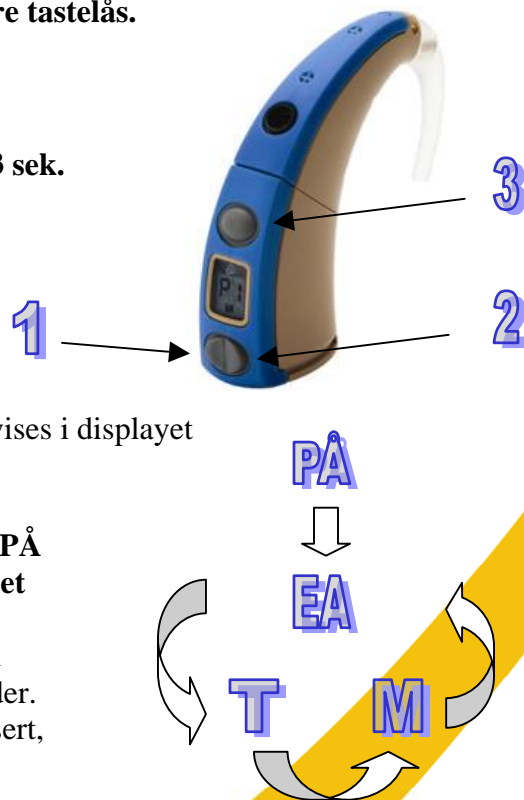

**NB! Vær oppmerksom på at ved bruk av telespole og Eksternt Audioutstyr kan mikrofonfølsomheten være dempet.**

## Beskrivelse av program

(Fylles inn ved programmering)

P1	P2	P3	P4



# Feilsøking – Freedom

## Feilmeldinger i display

Symptom	Årsak	Hva skal jeg gjøre
Display viser H1	Flatt batteri	Bytt batterier
Display viser H2	Batterier nesten utladet	Du kan bruke prosessoren en liten stund før du må bytte batterier
Display viser H3	Spolefeil	Sjekk at spolen er plassert riktig over implantatet. Dersom H3 fremdeles blinker – skift spole.
Display viser H4	Audiofeil	Sjekk innstillinger på Følsomhet (S) og at denne ikke står på 0. Dersom H4 fremdeles blinker, ta kontakt med klinikk eller Medisan
Display viser H5	Programfeil	Skift til et annet program som midlertidig løsning og ta kontakt med klinikk eller Medisan.
Display viser H6	Implantat ID-feil	Processor er ikke programmert til dette implantatet. Har du byttet om på Høyre og Venstre.

## Andre feil

Symptom	Årsak	Hva skal jeg gjøre
Prosessoren slår seg av	Defekt spoleledning	Skift spoleledning
Prosessoren slår seg av (forts.)	Dårlig kontakt til batterier	Skift holderen til batteriene (BTE) Hjelper det ikke, må hele kontrollen byttes.
Prosessoren slår seg av (forts.)	Dårlig kontakt mellom prosessordel og kontroller	Sjekk kobling. Dersom koblingen er løs ta kontakt med Medisan
Prosessoren bruker mer strøm enn vanlig	Defekt spoleledning	Skift spoleledning
Tastene virker ikke	Feil med kontroller	Kontroller må byttes. Kontakt Medisan
Kobling mellom prosessor og kontroller er løs	Slitt kobling	Ta kontakt med Medisan

